

depil Yourself®

Do-It-Yourself Haarentfernung

Die Antwort auf Ihre Fragen zur Nutzung

Notwendige Ausstattung für das Depil Yourself Konzept

Eine Behandlungskabine von ca. 5m², eingerichtet mit:

- Behandlungsstuhl oder einer Polstersitzbank, um die Behandlung in bequemer Position vornehmen zu können
- Rolltisch, um das Gerät fortbewegen zu können
- Kleiderablage, damit Ihr Kunde/Ihre Kundin die Kleider ablegen kann
- Regal für die Unterbringung des Zubehörs
- Bodenspiegel, um das Enthaaren zu erleichtern
- Kabinen-Aushang mit der schrittweisen Gebrauchsanleitung

Zubehör:

- Rasier-Kit für die Kunden
- Mizellarwasser zum Reinigen des zu enthaarenden Hautareals
- Papierspender für saugfähiges Papier

Wartung & Logistik vor der Behandlung

An der Rezeption:

- überprüfen Sie, dass Ihr Vitrinen-Aushang gut sichtbar ist
- positionieren Sie den Aufsteller so, dass er gut zugänglich ist
- überprüfen Sie, dass mindestens ein Exemplar jeder Pass-Karte vorhanden ist und dass Benutzer-Kits verfügbar sind

In der Kabine:

- vergewissern Sie sich, dass die Kabine sauber, empfangsbereit und mit allen notwendigen Elementen gebrauchsfertig ist
- reinigen Sie Ihr E-One Clinic Depil Yourself mit dem Spray Clean und einem weichen Tuch
- kontrollieren Sie, ob das E-One Clinic Depil Yourself angeschlossen ist
- wechseln Sie den Rasier-Kit aus, falls es benutzt wurde
- vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Kunden ausreichend Mizellarwasser und Vliespapier bereit gelegt haben

Einschränkungen für die Verwendung

Für manche Personen ist eine Enthaarung mittels Pulslicht ausgeschlossen, und zwar wenn eines der folgenden Kriterien auf sie zutrifft:

- Schwangere Frauen oder Diabetiker
- Behandlung weißer oder rotblonder Haare
- auf sehr stark pigmentierter oder schwarzer Haut
- bei Vorliegen von Verletzungen, Verbrennungen oder Infektionen der Haut
- bei Sonnenbrand, dessen Heilung erst weniger als einen Monat zurück liegt
- auf Hautverletzungen von ungewöhnlichem Aussehen
- auf Risikobereichen (Flecken, Muttermale, Warzen, noch nicht vernarbte Wunden...)
- wenn Muttermale oder Leberflecken sich auf dem zu enthaarenden Hautareal befinden, so müssen sie vorher mit Hilfe der Selbstklebe-Abdeckblättchen (Patches) abgedeckt werden, die im Benutzer-Kit geliefert werden
- auf tätowierten Hautarealen: Permanent-Make-up (zum Beispiel Lippenkonturen) oder ästhetische Tätowierungen, unabhängig von deren Farbe, ist die Begrenzungsplatte Stop zu verwenden
- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzem, Entzündungen, Akne usw.)
- Personen, die sich in einer photosensibilisierenden Behandlung befinden
- im Fall vorausgegangener Hauterkrankungen

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

Vor der Behandlung:

- wenn Ihr Kunde in letzter Zeit eine der folgenden Techniken angewandt hat, sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen
 - **Enthaarungscremes:** Nach der letzten so vorgenommenen Enthaarung 1 Woche abwarten
 - **Wachsprodukte, elektrisches Epiliergerät, Epilierpinzette:** Nach der letzten so vorgenommenen Enthaarung 3 Wochen abwarten, ehe das Pulslicht angewandt wird
 - **Lasertechnologie oder Flash-Lampen-Technologie:** Abwarten, bis die Haare nachwachsen
 - **Rasur:** die dauerhafte Haarentfernung kann sofort vorgenommen werden
- wenn Ihr Kunde bzw. Ihre Kundin in den letzten 4 Tagen eine Hochdruck-UV-Behandlung erhalten hat, verschieben Sie den Pulslicht-Behandlungstermin
- wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin auf dem zu enthaarenden Hautareal ein Selbstbräunungsmittel angewandt hat, verschieben Sie den Pulslicht-Behandlungstermin bis zum völligen Verschwinden der Wirkung des Selbstbräunungsmittels
- wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin eine Selbstbräunungskur mit einem oral verabreichten Mittel erhalten hat, verschieben Sie den Pulslicht-Behandlungstermin und warten Sie noch 1 Monat ab, nachdem die Einnahme des Mittels beendet wurde

Nach der Behandlung:

- informieren Sie Ihren Kunden/Ihre Kundin über die Notwendigkeit, auf den geflashten Hautarealen in den zwei ersten Wochen nach der Behandlung ein Sonnenschutzmittel mit sehr starkem Lichtschutzfaktor anzuwenden
- weisen Sie Ihren Kunden/Ihre Kundin darauf hin, dass er/sie 6 bis 8 Wochen zwischen 2 Flash-Behandlungen vergehen lässt

Empfehlungen zum Gebrauch

- das zu enthaarende Hautareal muss am Tag der Behandlung rasiert worden sein
- das zu enthaarende Hautareal muss sauber, trocken und frei von Kosmetika sein
- auf dem zu enthaarenden Hautareal müssen Creme, Feuchtigkeitsmilch, Öl oder sonstige Substanzen entfernt sein

Verwaltungstechnische und rechtsrelevante Dokumentation

- vergewissern Sie sich, dass Ihr Kunde/Ihre Kundin die Einwilligung nach erfolgter Aufklärung ausgefüllt und unterschrieben hat
- diese Bögen müssen vor jeder Behandlungssitzung ausgefüllt werden
- bewahren Sie alle diese Dokumente in Ihrem Archiv auf

Management des Verbrauchs an Flashes

Ihr Gerät wird mit einer bereits installierten Kassette geliefert.



Führen Sie Ihre ACTIVATION CARD in den seitlichen Schlitz am Gerät ein und drücken Sie die Taste, um die 3000 neuen Flashes zu laden.

Dieser Schritt ist jedes Mal auszuführen, wenn Sie die Optic-Kassette wechseln.



Überprüfung des Flash-Guthabens

Sie können jederzeit kontrollieren, wie viele Flashes noch auf der im Gerät installierten Kassette verfügbar sind. Dies geschieht mit Hilfe der CHECK-Karte.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:


Schieben Sie die CHECK-Karte in das seitliche Fenster des Gerätes ein. Die Zahl der noch verfügbaren Flashes wird rechts unten am Bildschirm angezeigt.

Wenn Ihr Guthaben verbraucht ist, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige XXXXX. Sie müssen dann die Optic-Kassette auswechseln, um weiter mit dem Gerät arbeiten zu können. Dazu schalten Sie das Gerät aus und warten ab, bis die Lüfter ganz zum Stillstand gekommen sind, erst dann ziehen Sie den Netzstecker.



Entnehmen der im Gerät vorhandenen Optic-Kassette

- den Applikator fassen und gleichzeitig auf die 2 Haltestifte des beweglichen Kopfes (a) drücken, den Kopf abziehen
- nachdem der bewegliche Kopf entfernt ist, wird die Optic-Kassette mit Filter sichtbar (b)
- die Kassette vom Applikator abnehmen, die Kassette so wie auf dem Foto (c) fassen und herausziehen, nun ist die Optic-Kassette herausgezogen (d)

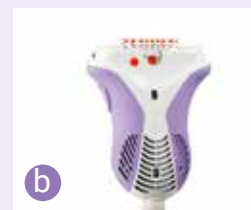

Sie darf nirgendwo anders angefasst werden als an den Plastik-Teilen (e).

Der Filter darf nie von der dazugehörigen Kassette getrennt und nicht berührt werden.



Einlegen einer neuen Optic-Kassette

Die Optic-Kassetten sind nicht symmetrisch und müssen daher mit ganz bestimmter Orientierung eingesetzt werden. Als Orientierungshilfe dienen die roten Punkte: der rote Punkt der Kassette muss mit dem roten Punkt des Applikators überein treffen (f).

- die Optic -Kassette anhand der roten Punkte mit dem Applikator ausrichten
- die Kassette in die Führung des Applikators einschieben, dazu an beiden Seiten drücken
- nach dem Einrasten der Kassette müssen Sie deren korrekten Sitz überprüfen: sie muss mit dem feststehenden Teil des Applikators (g) ausgerichtet sein



Ist dies nicht der Fall, wurde die Kassette falsch eingesetzt. Sie müssen die Kassette dann wieder herausnehmen und Folgendes prüfen:

- ob die Punkte überein treffen
- ob Sie die Elektroden nicht verdreht (verbogen) haben

Den Filter, und zwar nur an der zugänglichen Fläche, mit dem Clean-Spray reinigen.

Es ist streng verboten, das Clean-Spray direkt auf den Filter zu sprühen. Man muss es vorher auf ein saubere, trockenes Tuch sprühen (i).

Den beweglichen Teil des Applikators wieder einklinken, indem man gleichzeitig auf die Haltestifte des beweglichen Kopfes (h) drückt, dabei auf die Ausrichtung des roten Punkts innen am Applikatorkopf mit dem Punkt am Applikator achten.